

Stichwunde und Instrumente mit Alkoholtupfern desinfizieren

Prüfung auf Funktion:

Wenn die Zecke nach Gebrauchsanweisung entfernt wurde, ist die Funktionsprüfung bestanden. Den Haken optisch auf etwaige Beschädigung prüfen.

Reinigen und desinfizieren:

Entfernte Zecke aus der Spitze schieben.

Mit apothekenüblichen Alkoholtupfern getränkt in 70% Alkohollösung (z.B. Isopropylalkohol). Den Draht in Richtung der Drahtspitze unter Ausnutzung seiner Federwirkung mehrfach abwischen. Produkt umdrehen und letzten Schritt wiederholen. Zuletzt den Griff abwischen.

Aufbewahrung:

Produkt in die Verpackung zurücklegen.

Den Haken ebenso mit apothekenüblichen Alkoholtupfern desinfizieren